



Abstrich-Muster

Für Rachen-, Augen-Abstrich o. ä. (trockener Abstrich)



Kunststoffstab; dick; stabile Handhabung; in der Regel zu verwenden




Metallstab; dünn; geeignet für enge Entnahmereiche

- ⇒ z. B. Adenoviren, Augenabstrich (PCR)
- ⇒ z. B. Influenza-A+B-Schnelltest
- ⇒ z. B. Influenza-A+B-PCR (z. B. auch H1N1)
- ⇒ z. B. Bordetella pertussis-PCR
- ⇒ z. B. für Respiratory-Syncytial-Virus (RSV) (Antigentest)

Für Rachen-, Nasen-Abstrich, Wundabstrich o. ä. (mit Transportmedium)



Kunststoffstab; dick; stabile Handhabung; in der Regel zu verwenden

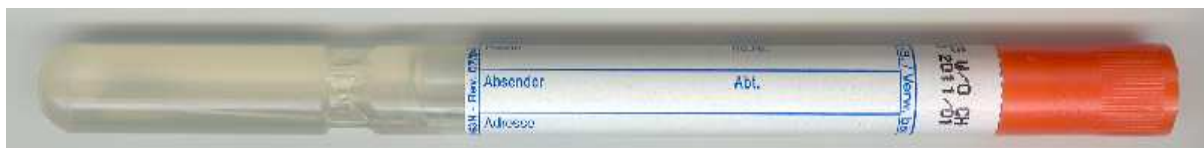

Metallstab; dünn; geeignet für enge Entnahmereiche

- ⇒ Bakteriologie, E + R, MRSA
- ⇒ Mykologie, z.B. Verdacht auf Candidose
- ⇒ z. B. B-Streptokokken

Abstrichtupfer-Kohlemedium. Nur für Gonorrhoe (Männer und Frauen)



Kunststoffstab




Chlamydia trachomatis- / GO-PCR

⇒ Frauen, **Abstrich** kurativ bei Kassenpat.+ IGeL + Privatpat.



Chlamydia trachomatis- / GO-PCR

⇒ Männer, **Abstrich** kurativ bei Kassenpat.+ IGeL + Privatpat.
 ⇒ ebenfalls geeignet als Augenabstrich

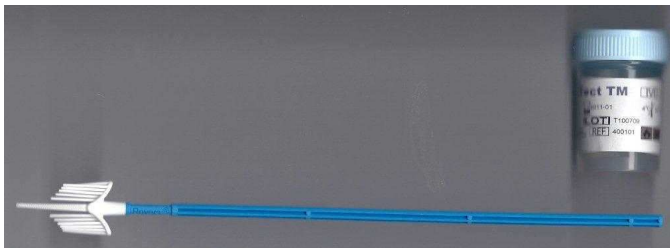

HPV - DNA - Nachweis

⇒ Frauen, **Abstrich** kurativ bei Kassenpat. + IGeL + Privatpat.
 ⇒ Männer, **Abstrich** bei IGeL + Privatpat. (anal)
 ⇒ Männer (Harnröhre + Rachen) Trockener Abstrich wie bei PCR (siehe Seite 1)



Urivette

⇒ für Nachweis z.B. von Chlamydia trachomatis (PCR) gemäß Richtlinien bzgl. Mutterschaftsvorsorge, Empfängnisregelung sowie Schwangerschaftsabbruch
 ⇒ Männer, kurativ bei Kassenpat. + IGeL + Privatpat.
 ⇒ Aus dem Urin kann ebenfalls eine GO-PCR erfolgen.
 ⇒ E + R, alle Harnuntersuchungen

Handhabung:

- Mit der Urivette nimmt man den Urin durch Aufsetzen des Ansaugschlauches und Zurückziehen des Kolbens aus dem Sammelgefäß auf.
- Anschließend wird der Ansaugschlauch wieder abgezogen, der kleine Verschluss fest oben aufgesetzt.
- Jetzt kann man den nach unten gezogenen Kolben durch eine leichte Drehbewegung abbrechen.
- Die Urivette ist nun für den sicheren Urin-Transport dicht verschlossen.